

Amalain

ЛИНЕЙКА ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ НЕЖИВОТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ БИОРЕВИТАЛИЗАЦИИ И КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ



Amalain

Amalain - линейка препаратов на основе гиалуроновой кислоты неживотного происхождения для биоревитализации, объёмной и контурной пластики.



AMALAIN. Преимущества

- ✓ Гарантированная безопасность и эффективность
- ✓ Соответствие стандарту ISO 13485
- ✓ Широкий выбор для коррекции различных эстетических проблем
- ✓ Запуск процесса активации фибропластов
- ✓ Стимуляция выработки коллагена
- ✓ Неживотного происхождения рекомбинантный продукт
- ✓ Остаточное содержание BDDE — 0,4 ppm (по стандарту не более 2 ppm)
- ✓ Отсутствие белков и эндотоксинов
- ✓ Биологически 100% совместимый
- ✓ Иммунологически инертный

Биоревитализант

- **Концентрация ГК** – 2.0% (20 мг/мл)
- **Объем** – 2.0 мл
- **Молекулярная масса** – 3 MDa
- **Глубина введения** – поверхностные и

средние слои дермы (расстояние между
вколами – 1 см)

- **Техника введения** – папульная,
линейно-ретроградная
- **Область введения** – лицо, шея,
декольте, волосистая часть головы,
поверхность голени, поверхность бедер и
ягодиц, поверхность плеча и предплечья,
тыльная поверхность кистей рук и стоп,
передняя брюшная стенка



Показания

- Возрастные изменения кожи
- Дегидратация дермы
- Признаки фото и хроностарения
- Снижение тургора и эластичности
- Нарушение функции сальных желез
- Подготовка к объемной и контурной пластике, тредлифтингу

Эстетические эффекты

- Увлажнение и питание
- Осветление и сияние
- Повышение тургора
- Выраженный биолифтинговый и тонизирующий эффект
- Омоложение
- Выравнивание цвета кожи
- Улучшение рельефа кожи
- Коррекция и уменьшение выраженности стрий

Amalain

Контурная пластика Amalain



AMALAIN soft

Концентрация ГК	2,0% (20 мг/мл)
Стабилизация	BDDE
Объем	1,0 мл
Молекулярная масса	3 MDa
Степень поперечной связки	Низкая
Глубина введения	Поверхностные, средние и глубокие слои дермы, подкожно (0.5 - 1.5 мм)
Техника введения	Линейно-ретроградная, болюсная
Длительность эффекта	4-7 месяцев



AMALAIN soft

Области введения

- Мелкие морщины в области лба и межбровья
- «Гусиные лапки»
- Биоармирование овала лица
- Тонкие носогубные складки
- Мелкие кисейные морщины
- Носослезная и среднещечная борозда
- Коррекция объема, контура и комиссур губ
- Морщины подбородка
- Объемная пластика тыла кистей
- Заполнение морщин в области шеи
- Биоармирование декольте
- Коррекция височной области



Amalain

AMALAIN medium

Концентрация ГК	2,0% (20 мг/мл)
Стабилизация	BDDE
Объем	1,0 / 2,0 мл
Молекулярная масса	3 MDa
Степень поперечной связки	Средняя
Глубина введения	Средние и глубокие слои дермы (от 2.0 мм)
Техника введения	Линейно-ретроградная, болюсная
Длительность эффекта	8-12 месяцев



AMALAIN medium Области введения

- Выраженные межбровные морщины
- Биоармирование овала лица
- Выраженные носогубные складки
- Выраженные кисетные морщины
- Коррекция объема и контура губ
- Комиссуры губ
- Губоподбородочные морщины
- Морщины подбородка
- Softlifting скуло-щечных областей



AMALAIN hard

Концентрация ГК	2,0% (20 мг/мл)
Стабилизация	BDDE
Объем	1,0 / 2,0 мл
Молекулярная масса	3 MDa
Степень поперечной связки	Высокая
Глубина введения	Глубокие слои дермы (2.0-5.0 мм) подкожно и супрапериостально
Техника введения	Линейно-ретроградная, болюсная
Длительность эффекта	12-18 месяцев



AMALAIN hard Области введения

- Ринопластика
- Объемная пластика и биоармирование овала лица
- Глубокие носогубные складки
- Губоподбородочные складки
- Объем подбородка
- Угол нижней челюсти



Amalain

AMALAIN Фото ДО/После



Увеличение губ филлером Amalain Medium