

REVI

Омоложение кожи на уровне клеток

ДОКАЗАННЫЙ ПРОФИЛЬ
БЕЗОПАСНОСТИ

БЛАГОРОДНОЕ
СИЯНИЕ КОЖИ

ИНТЕНСИВНОЕ
УВЛАЖНЕНИЕ И
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

СТОЙКИЙ
РЕЗУЛЬТАТ
НАДОЛГО



REVI

Трегалоза +
Гиалуроновая кислота

=

*Совершенный дуэт
для «клеточной»
терапии кожи*

REVI Eye correction: ГК 1%, трегалоза 0,02%



REVI Style: ГК 1%, трегалоза 0,015%

REVI Silk: ГК 1,2%, трегалоза 0,025%

REVI Strong: ГК 1,5%, трегалоза 0,03%

ТРЕГАЛОЗА

Дисахарид растительного происхождения, состоящий из 2-х остатков D-глюкозы, связанных α -1,1-гликозидной связью

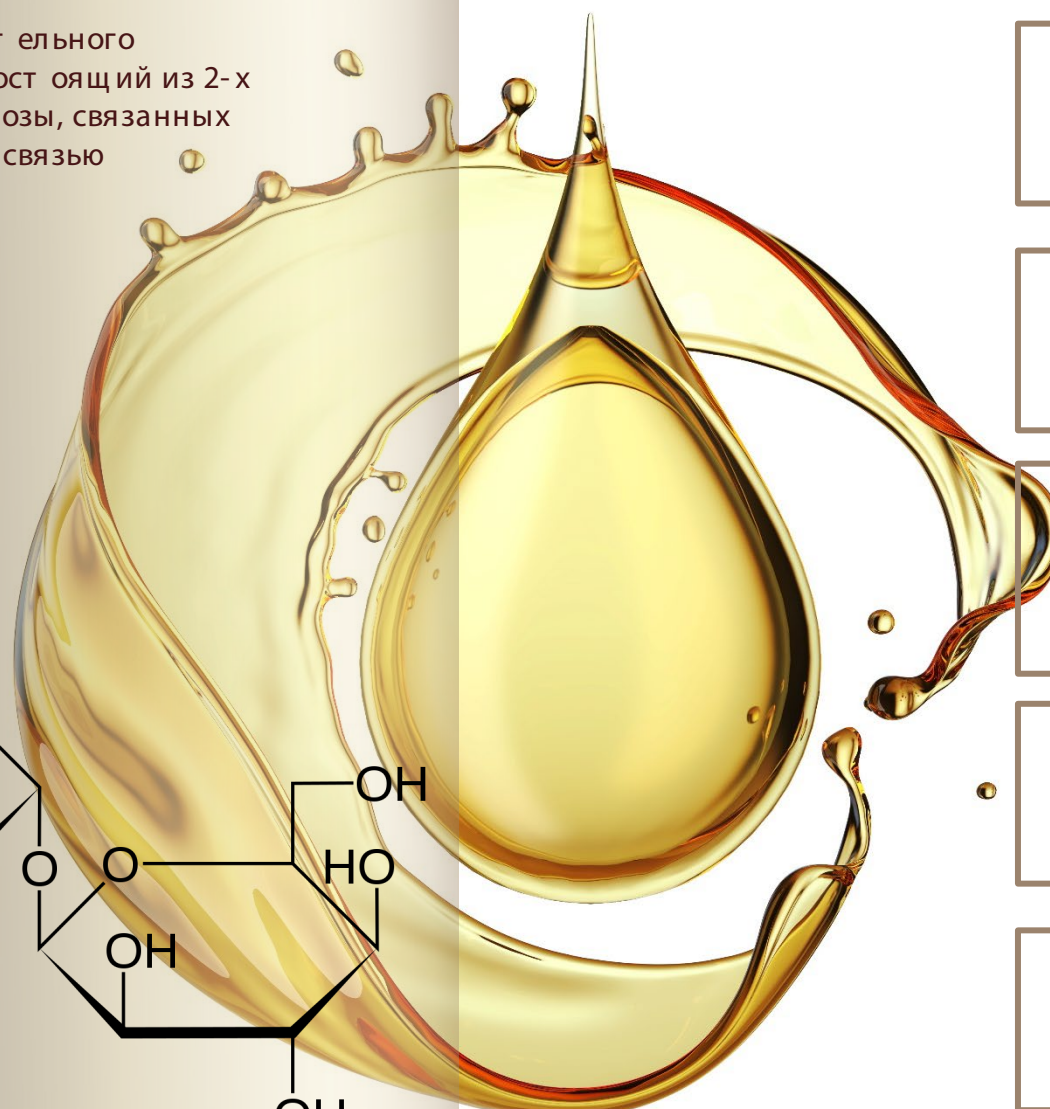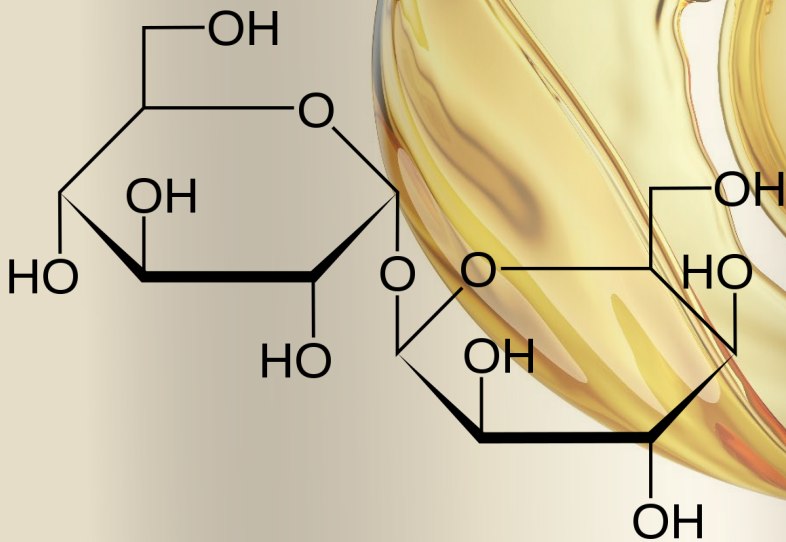

Участвует в активации апоптоза с целью своевременного **обновления** клеток

Нейтрализует свободные радикалы

Оказывает **противовоспалительное** действие

Стабилизирует клеточные мембраны за счет обволакивания и затруднения подхода к ним гликозидаз

Не участвует в процессах гликации

Обеспечивает лимфодренажную функцию и **улучшает** микроциркуляцию

Препятствует преждевременному старению клеток за счет ингибирования активности ПОЛ

Усиливает местный иммунитет

Выступает в качестве **естественного стабилизатора** гиалуроновой кислоты

Защищает белки от денатурации и преципитации

Запускает самоочистку клеток - **аутофагию**

Нормализует процесс меланогенеза


В ФОКУСЕ- ТРЕГАЛОЗА

Трегалоза широко
используется за
рубежом

В США трегалозе
присвоен статус GRAS
(*Generally recognized
as safe*)-
**общепризнанная
безопасность**

FDA
REGISTERED

Имеет сертификат FDA

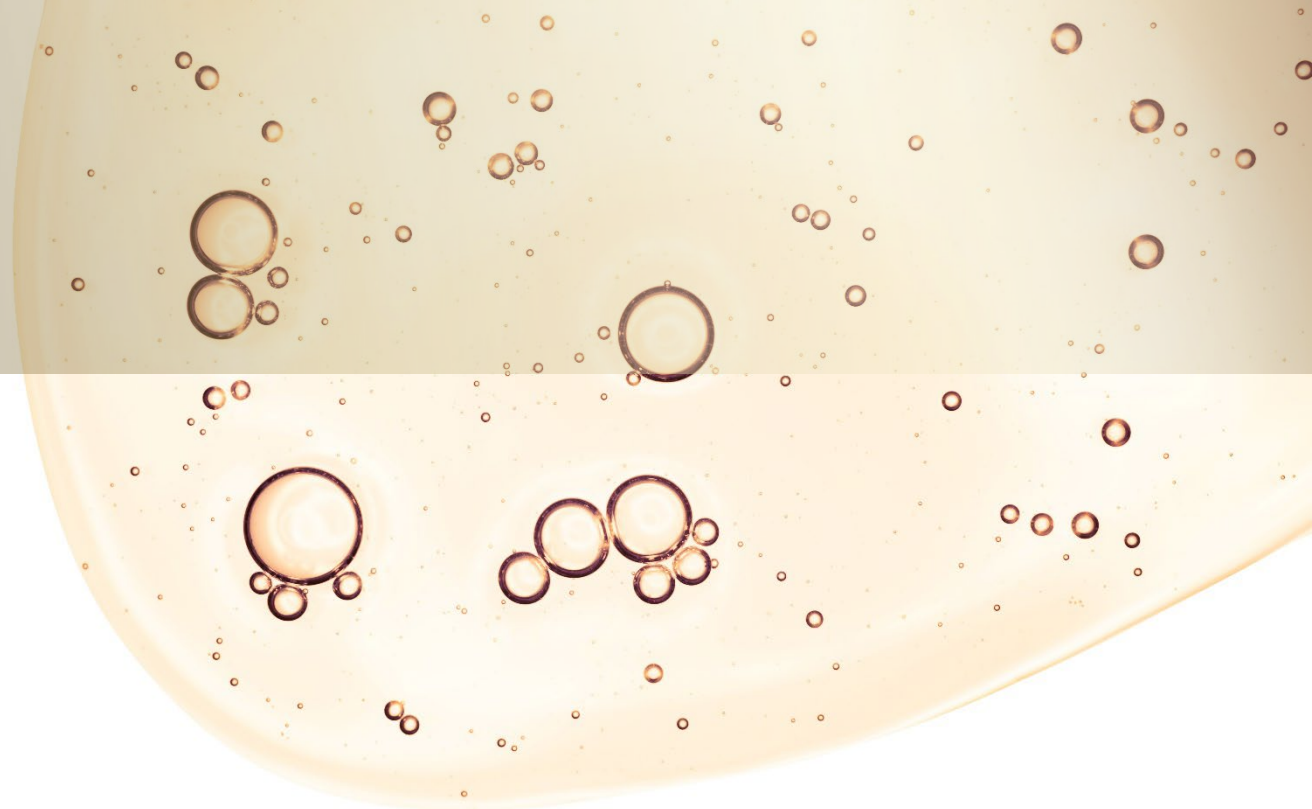

REVI ПРОИЗВОДСТВО

Разработкой и созданием продукции занимаются высококвалифицированные специалисты, имеющие более чем 20-летний опыт успешных исследований в области охранения здоровья

В производстве изделий используются сырье и комплектующие из Европы, США, Японии и Южной Кореи. Гиалуриновая кислота только высокой степени очистки и самого лучшего качества

Производство ведется на высокотехнологическом оборудовании немецкой компании Groninger, осуществляющей авторский надзор за эксплуатацией оборудования, а также обеспечивающей оборудование расходными комплектующими и форматными частями

Компания производит изделия с уникальным составом и авторской технологией производства, зарегистрированные в Российской Федерации. Осуществляется непрерывный аудит производителей и поставщиков компонентов изделий и упаковочных материалов


Эффективная линия препаратив REVI с уникальным соединением в составе



REVI EYE

Концентрация ГК: 1.0 %
Молекулярная масса ГК: 3.0 mDa
Концентрация трегалозы: 0.02 %
Техника введения: микропапульная
Область введения: периорбитальная
Рекомендуемая игла: 33G/13мм
Объем: 1 мл
Протокол: 3 процедуры / 3-4 недели

Микропапульное введение препарата вдоль путей лимфотока. На каждую периорбитальную зону (в пределах костного края орбиты) вводить не более 0,3 мл препарата (верхнее и нижнее веко)

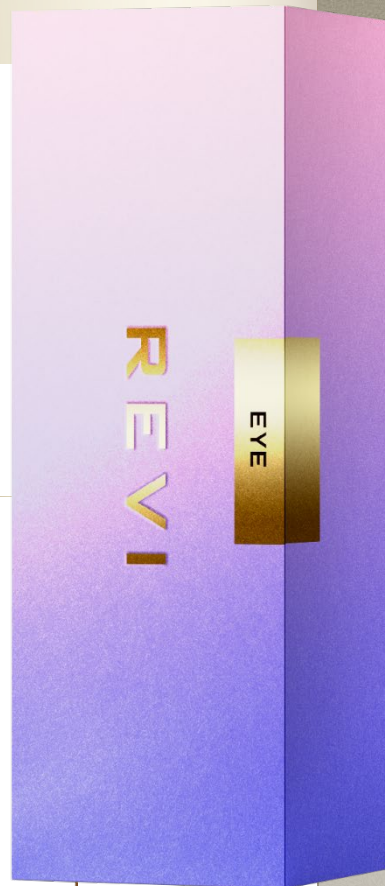

*Глаза -
зеркало души*

Показания:

- Темные круги под глазами
- Снижение тонуса и тургора кожи
- Морщины в периорбитальной зоне
- Коррекция периорбитальной гиперпигментации
- Подготовка кожи к блефаропластике и инвазивным процедурам и реабилитация после них



REVI STYLE

Концентрация ГК: 1.0 %
Молекулярная масса ГК: 3.0 mDa
Концентрация трегалозы: 0.015 %
Техника введения: бугорковая
(внутридермально, субдермально)
Рекомендуемая игла: 33G/4мм
Объем: 1 и 2 мл
Протокол: 2 процедуры / 3-4 недели



*Микропапульно
(периорбитальная зона
не более 0,3 мл на каждую
сторону), бугорковая
(по всему лицу)*

*Способен сохранить
и продлить **молодость в коже***


Показания:

- Профилактика первых признаков возрастных изменений кожи
- Предупреждение развития гиперпигментации, вызванной УФ излучением
- Поддержание молодости и восстановление кожи после воздействия неблагоприятных факторов (активная инсоляция, активный зимний отдых и тд.)
- Поддерживающая процедура для пролонгации эффекта от курса процедур REVI по показаниям (пигментация, розацеа и тд)
- Подготовка кожи перед другими инъекционными и аппаратными методиками



REVI SILK


Концентрация ГК: 1.2 %
Молекулярная масса ГК: 3.0 mDa
Концентрация трегалозы: 0.025 %
Техника введения: бугорковая
(внутридермально, субдермально)
Рекомендуемая игла: 33G/4мм
Объем: 1 и 2 мл
Протокол: 3 процедуры / 3-4 недели

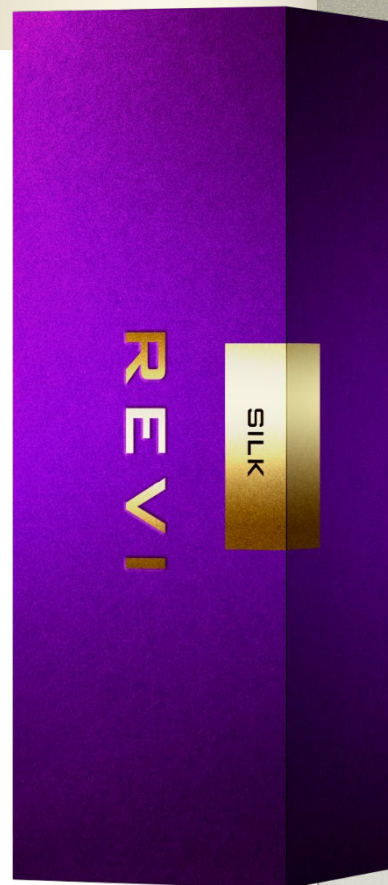

*Идеально
для чувствительной
кожи*

Показания:


- Изменения 2-3й степени по шкале Мерц, II-III типа по Глогау
- Коррекция возрастных изменений (мелкие морщины, потеря тургора и эластичности кожи)
- Обезвоженная кожа
- Гиперпигментация
- Восстановление микроциркуляции
- Купероз
- Розацеа

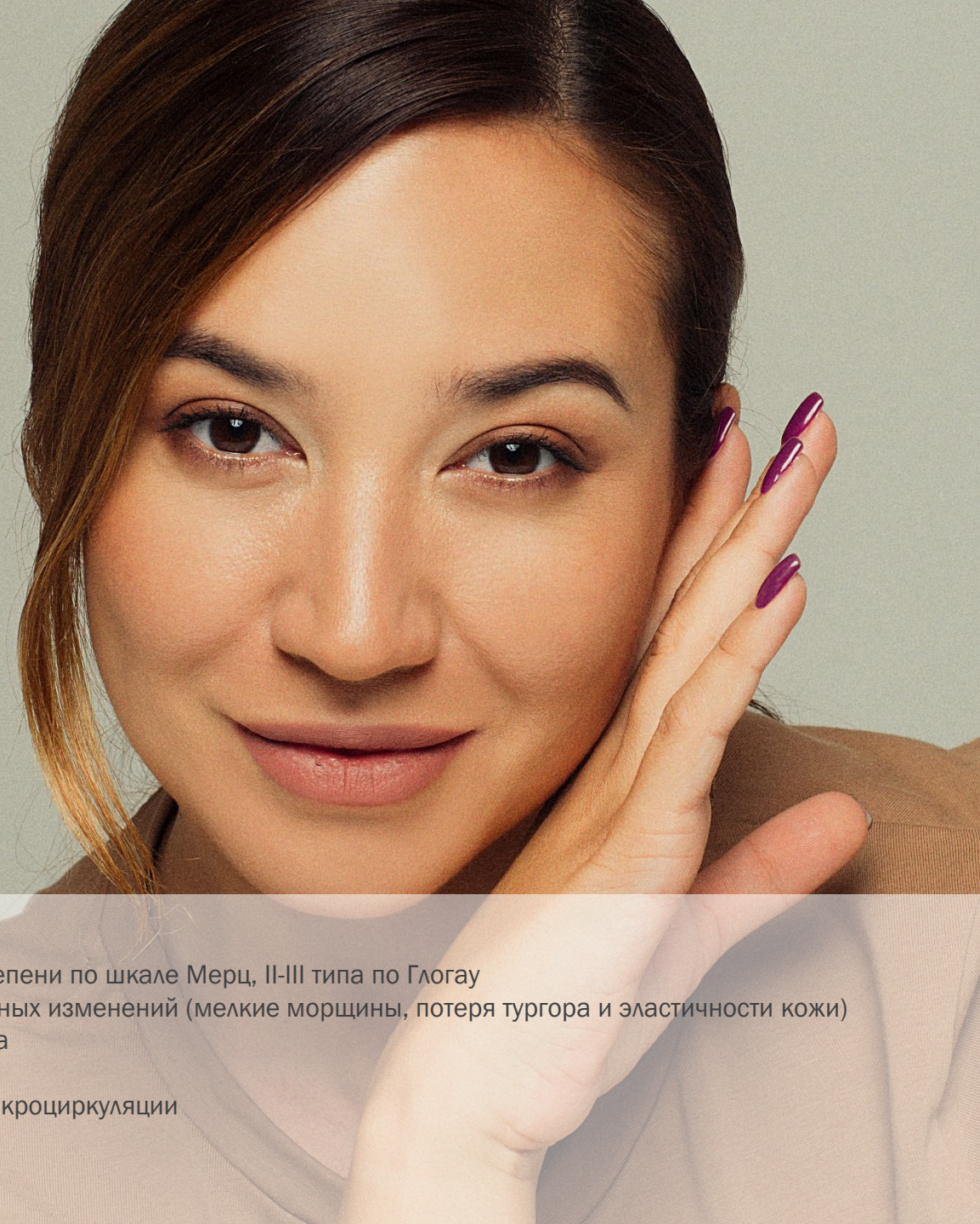

REVI STRONG

Лицо без фильтров

Концентрация ГК: 1.5 %
Молекулярная масса ГК: 3.0 mDa
Концентрация трегалозы: 0.03 %
Техника введения: бугорковая
(внутридермально, субдермально),
линейная с использованием канюли
Рекомендуемая игла: 33G/4мм
Канюля: 22G
Объем: 1 и 2 мл
Протокол: 3 процедуры / 3-4 недели

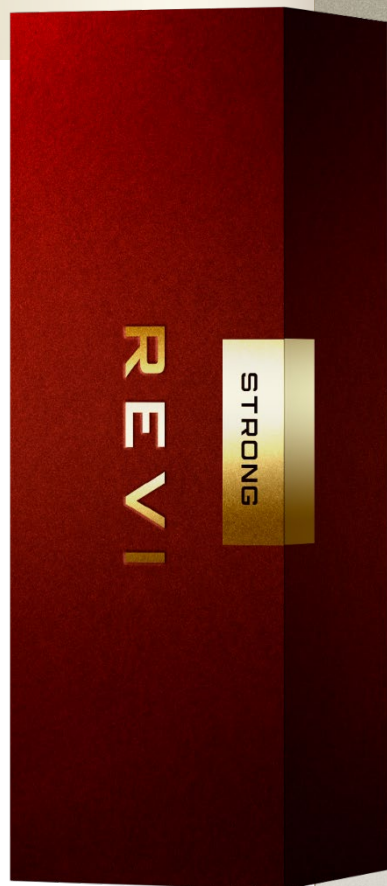

Показания:

- Изменения 3-4 й степени по шкале Мерц, III-IV типа по Глогау
- Коррекция возрастных изменений (мелкие морщины, потеря тургора и эластичности кожи)
- Гиперпигментация
- Постакне (рубцы, застойные пятна)
- Розацеа (папуло-пустулезный подтип в стадии ремиссии)
- Синдром фанетопически жирной кожи
- Расширенные поры
- Подготовка к другим инъекционным и аппаратным методикам и реабилитация после них



REVI + АППАРАТНЫЕ МЕТОДИКИ ИДЕАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Создание пролонгированного и полноценного гидрорезерва кожи

Трегалоза является «предохранительным клапаном» для защиты и восстановления биологических мембран от повреждений, вызванных свободными радикалами за счет уникального механизма стабилизации фосфолипидов и белков, входящих в ее состав

Уникальное свойство трегалозы-запускать процесс аутофагии, что способствует самоочищению клеток от мусора, в том числе денатурированных белков, тем самым не давая им повреждать вновь образовавшиеся белки, имеющие правильную структуру

Снижение риска развития поствоспалительной (посттравматической) гиперпигментации

Двойной противовоспалительный эффект-минимизация рисков нежелательных явлений

Высокая регенерация кожи за счет улучшения микроциркуляции

REVI ПРЕИМУЩЕСТВА

Биоревитализацию препаратом REVI проводят с интервалом один раз в месяц, на курс 2-3 процедуры, что позволяет экономить время и денежные средства пациента (в сравнении с другими препаратами данной группы), при этом получая максимальных эффект

Благодаря особой технике введения, составу препаратов REVI, использованию высококачественных наноигл, идущих в комплекте с препаратом, неприятные ощущения во время процедуры минимальны, а длительность реабилитационного периода составляет всего 2-3 дня

Сочетает в себе быстрый результат, который заметен уже после первой процедуры, а так же обеспечивает длительный эффект при прохождении курса

REVI

БЕЗОПАСНОСТЬ

Трегалоза имеет сертификат FDA, широко используется за рубежом в медицине и пищевой промышленности. Хорошо изучена: несколько сотен публикаций охватывают огромный промежуток времени – несколько десятилетий

Согласно данным исследования, проведенном на базе кафедры косметологии ФГБОУ ВО “Северо-западный Государственный Медицинский Университет Имени И.И. Мечникова” Минздрава России- эффект от биоревитализации препаратом REVI сохранялся в течение 6 месяцев наблюдения

Проведено 3 клинических исследования, подтверждающие эффективность и безопасность бивитализантов REVI

Препараты линии REVI сочетаются с большинством инъекционных и аппаратных методик, усиливая их эффект и сводят к минимуму риск развития нежелательных явлений

Препараты REVI гипоаллергенны, не способствуют развитию аутоиммунных реакций т.к. компоненты препарата полностью биodeградируют с образованием углекислого газа и воды

Трегалоза - «сахар покоя», в процессе роста клеток не используется. Высокое содержание трегалозы в клетке несовместимо с ростовыми процессами

Широкая палитра возможностей применения: REVI – 2-х компонентный препарат по числу эффектов сопоставим с многокомпонентными средствами и даже их превосходит

Препараты зарегистрированы на территории РФ. РУ № ФСР 2010/08694 от 07.10.2021 г.