

# REPART<sup>®</sup>

(n o a)



## БИОРЕВИТАЛИЗАНТЫ И СКИНБУСТЕРЫ

## ОПИСАНИЕ ЛИНИИ БИОРЕВИТАЛИЗАНТОВ

# REPART<sup>®</sup>







- Палитра биоревитализантов Repart<sup>®</sup> представлена 5 видами препаратов с улучшенными характеристиками.
- Препараты зарегистрированы и производятся как в шприцах для работы с отдельными зонами лица, шеи и декольте, так и во флаконах по 5 мл для обработки более широких зон.
- Безопасность и качество препаратов подтверждены стандартами ISO и GMP, в строгом соответствии с которыми выпускается продукция.
- Контроль качества осуществляется на всех этапах производства: от сырья до проверки каждого шприца и флакона. Все препараты проходят двойной контроль: автоматический и ручной.
- Препараты Repart<sup>®</sup> разработаны российской фармацевтической компанией на базе собственного научно-производственного центра ИНГАЛ (Ingal) с использованием инновационных технологий.
- В основе производства лежит применение современного высокотехнологичного роботизированного оборудования, которое не имеет аналогов на территории России.

ПРОДУКЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СООБЩЕСТВА

# RU REPORT® 4,5,6 №РЗН 2019-8473 ОТ 27.09.2019







# ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ, СЕРТИФИКАТ REPORT® 4,5,6

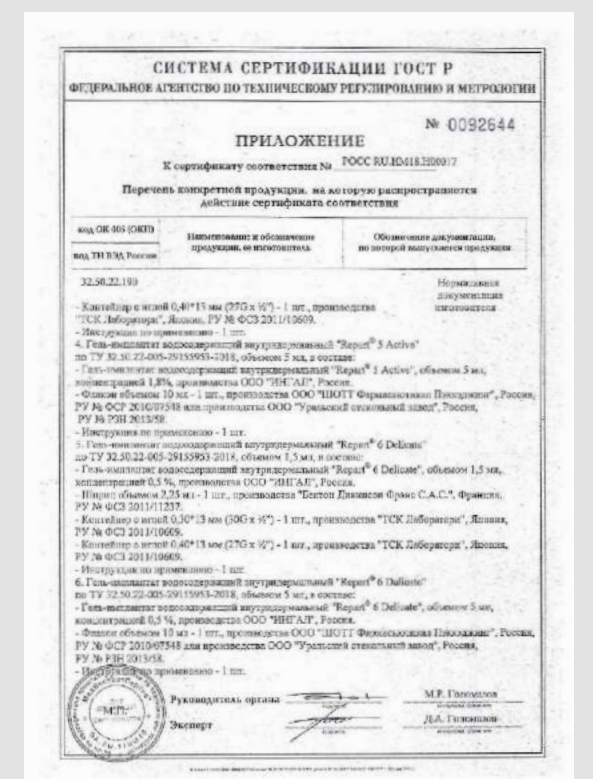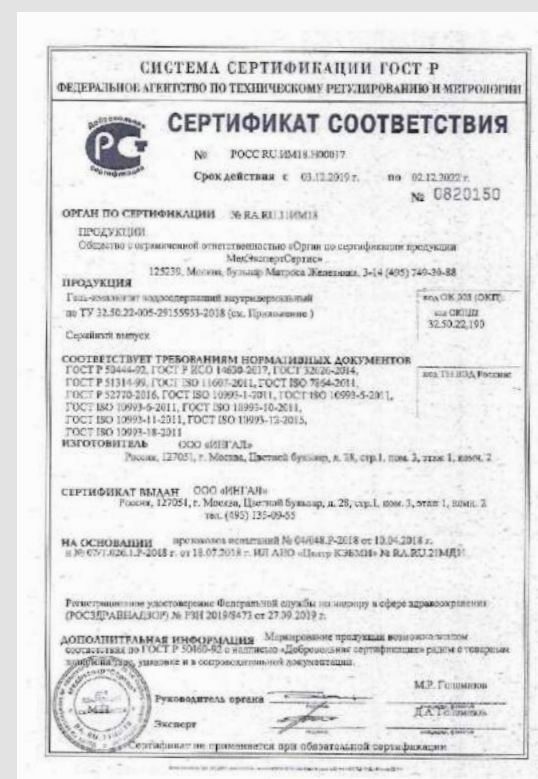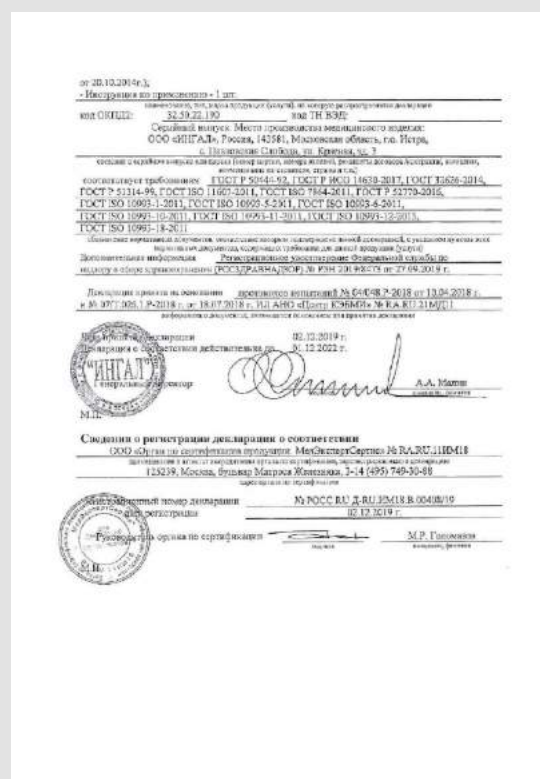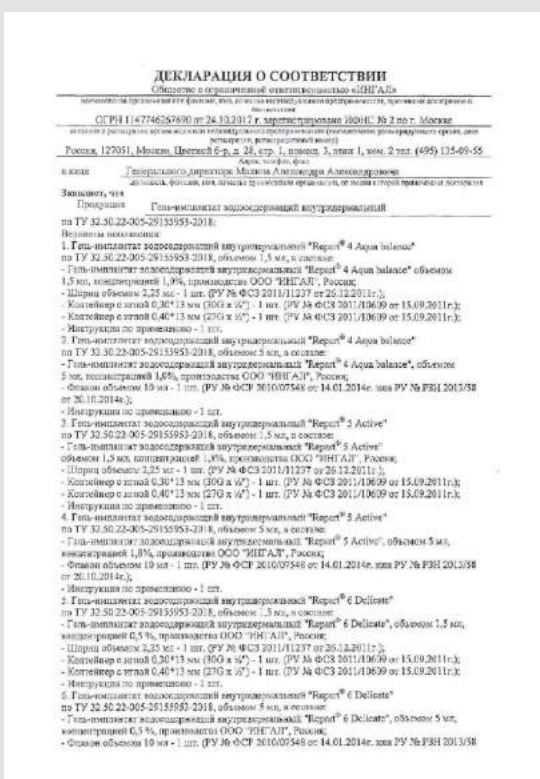

# RU REPORT® 7 №РЗН 2019-8470 ОТ 11.10.2019



# ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ, СЕРТИФИКАТ REPORT® 7

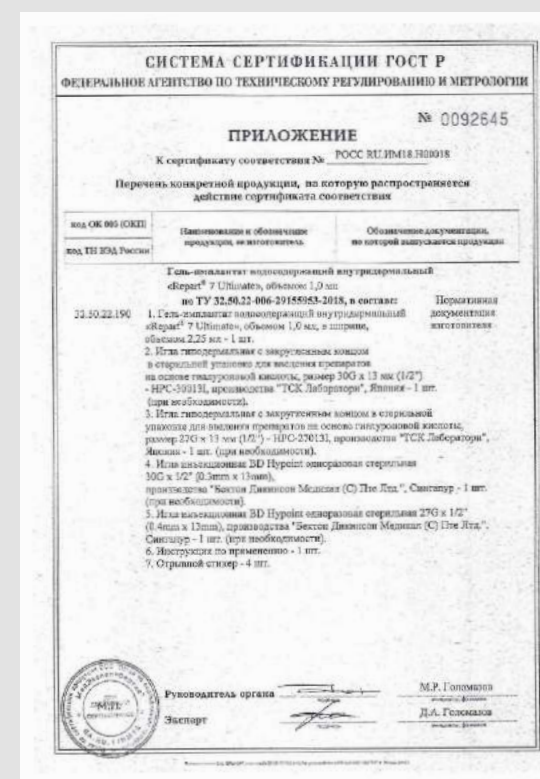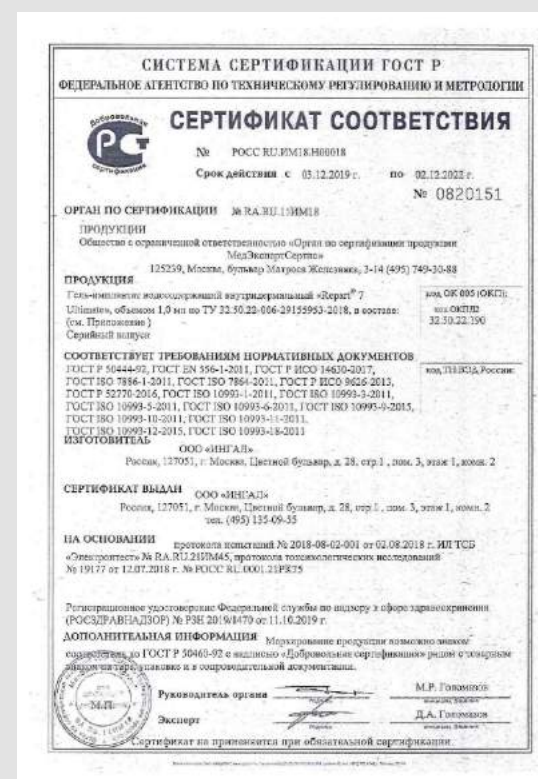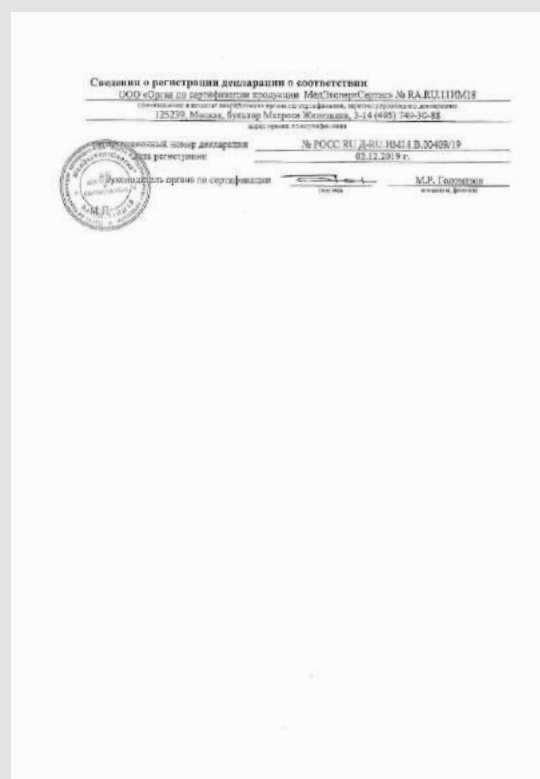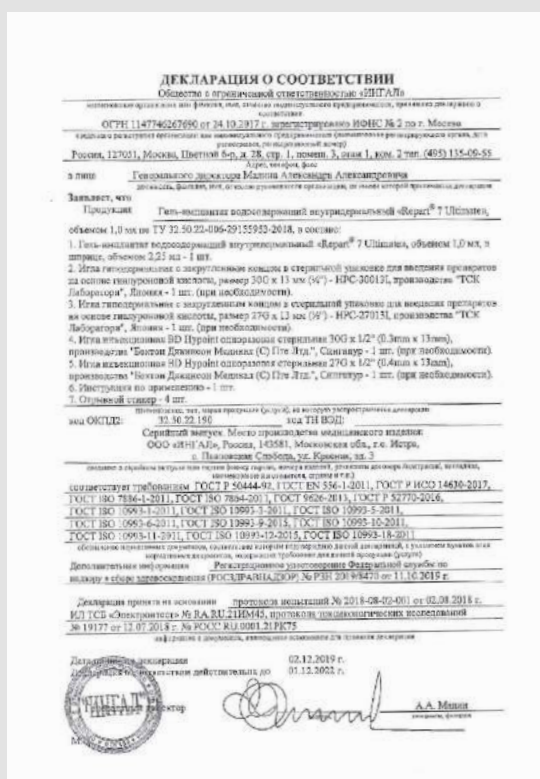





# REPART® 4 AQUA BALANCE

## Универсальный бимодальный\* биоревитализант

\*Бимодальность – комбинация гиалуроновой кислоты двух разных молекулярных масс в составе одного биоревитализанта.

### ФОРМА ВЫПУСКА:
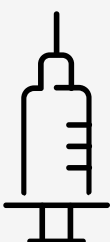
<b>1,5 мл</b> шприцы (стекло)		<b>5 мл</b> флаконы (стекло)	
-------------------------------------	--	------------------------------------	---

**REPART® 4 AQUA BALANCE** — универсальный бимодальный биоревитализант с эффектами классической биоревитализации, восстанавливающий межклеточную матрицу дермы. Препарат обладает способностью удерживать влагу, стимулирует фибробласты, частично запускает ресинтез собственной ГК, стимулирует выработку коллагеновых и эластиновых волокон.

### ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА

Наличие в составе ГК разной молекулярной массы способствует достижению тройного эффекта:

1. Немедленное увлажнение
2. Сияние кожи за счет ГК молекулярной массой 1,2 МДа
3. Пролонгированная биоревитализация за счет ГК молекулярной массой 2,5 МДа

### ОСОБЕННОСТЬ ПРЕПАРАТА

Быстрое и равномерное распределение геля внутри дермы. Папулы контурируются не более 2 суток. Комфортное и удобное введение геля для специалиста и пациента с низким риском реабилитационных последствий.

### РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА:

- Увлажнение
- Повышение эластичности кожи
- Разглаживание мелких морщин
- Улучшение цвета кожи (устранение усталого вида и темных кругов вокруг глаз)



### ПОКАЗАНИЯ:

- Пациенты в возрасте 25-35 лет
- Сухость кожи любой этиологии
- Профилактика и терапия фотостарения
- Профилактика и терапия хроностарения
- Темные круги в периорбитальной области и усталый внешний вид
- Омоложение кожи тыльной поверхности кистей рук и тела
- Комплексная терапия постакне
- Тонкая, сухая и склонная к сухости кожа с усталым морфотипом
- Подготовка и реабилитация пациентов до и после агрессивных процедур: срединные и глубокие химические пилинги, лазерная шлифовка, пластические операции
- Повышение результативности нитевого лифтинга и контурной пластики, а также других косметологических процедур: химического пилинга, ботулинотерапии, аппаратных методик

## СОСТАВ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Натрия гиалуронат	1,2 МДа	Концентрация ГК	10 мг/мл (1%)
Натрия гиалуронат	2,5 МДа	pH =	7,1 (+/- 0,1)

## РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС:

Рекомендованный курс:	4 процедуры с интервалом 14 дней
Поддерживающие процедуры:	1 раз в 1,5-2 месяца



## РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ОБЪЕМ НА ПРОЦЕДУРУ:

Лицо	1,5 мл	Декольте	1,0 мл
Шея	1,0 мл	Тыльная поверхность кистей рук	1,5 мл

<b>Техники:</b> Микропапульная, папульная, линейная, канюльная	<b>Длительность контурирования папул:</b> 2 - 3 суток
---	--

## КЛИНИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

Конечными клиническими эффектами после введения препарата являются увлажнение и повышение гидрорезерва кожи, улучшение микроциркуляции и обменных процессов, нормализация синтеза эндогенной ГК и волокнистых структур дермы (коллагена и эластина), повышение защитных и репаративных свойств кожи.



В результате курсового использования препарата наблюдается разглаживание микрорельефа, нормализация сальности у пациентов с жирной кожей, устранение мелких и уменьшение выраженности средних морщин, уменьшение темных кругов вокруг глаз, повышение объемных характеристик дермы, уменьшение проявлений постакне.

# REPART® 5 ACTIVE

## Концентрированный бимодальный\* биоревитализант

\*Бимодальность – комбинация гиалуроновой кислоты двух разных молекулярных масс в составе одного биоревитализанта.

### ФОРМА ВЫПУСКА:
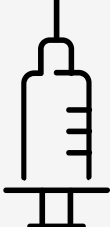
<b>1,5 мл</b> шприцы (стекло)		<b>5 мл</b> флаконы (стекло)	
-------------------------------------	--	------------------------------------	---

**REPART® 5 ACTIVE** — концентрированный бимодальный биоревитализант с оптимальной концентрацией гиалуроновой кислоты, адаптированный для достижения полноценного эффекта увлажнения и омоложения кожи у пациентов.

### ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА

Наличие в составе ГК разной молекулярной массы способствует достижению тройного эффекта:

1. Немедленное увлажнение
2. Сияние кожи за счет ГК молекулярной массой 1,2 МДа
3. Пролонгированная биоревитализация за счет ГК молекулярной массой 3 МДа

Благодаря своей текучести и вязкоэластичности гель-имплантат равномерно распределяется в слоях дермы, что обеспечивает восстановление утраченных анатомических структур кожи и достижение выраженного лифтингового эффекта. Полученный косметический результат сохраняется в течение 3-4 месяцев.

### ОСОБЕННОСТЬ ПРЕПАРАТА

Уплотненный гель постепенно распределяется в тканях, что обеспечивает пролонгированное биоревитализирующее действие.

### РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЕ И РЕСТРУКТУРИЗИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА:

- Лифтинг
- Глубокое увлажнение
- Сокращение кожного лоскута
- Повышение тургора и эластичности кожи
- Разглаживание мелких и глубоких морщин, а также кожных складок



### ПОКАЗАНИЯ:

- Пациенты возрастной категории 35+
- Гравитационные изменения
- Комплексная терапия постакне
- Сухость кожи любой этиологии
- Мелкоморщинистый морфотип
- Профилактика и терапия фотостарения
- Профилактика и терапия хроностарения
- Биоармирование мягких тканей (в комплексе с другими процедурами)
- Омоложение кожи тыльной поверхности кистей рук и кожи тела
- Коррекция стрий
- Выраженные признаки дерматоатрофии: глубокие морщины и складки, сниженный тургор, непроходящая сухость
- Усталый тип лица с мелкими морщинами и явными проявлениями возрастных изменений
- Повышение результативности нитевого лифтинга и других косметологических процедур (методов)
- Подготовка и реабилитация пациентов до и после агрессивных процедур: срединные и глубокие химические пилинги, лазерная шлифовка, пластические операции

## СОСТАВ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Натрия гиалуронат	1,2 МДа	Концентрация ГК	18 мг/мл (1,8%)
Натрия гиалуронат	3 МДа	pH =	7,1 (+/- 0,1)

## РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС:

Рекомендованный курс:	4 процедуры с интервалом 14 дней
Поддерживающие процедуры:	1 раз в 1,5-2 месяца



## РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ОБЪЕМ НА ПРОЦЕДУРУ:

Лицо	1,5 мл	Декольте	1,0 мл
Шея	1,0 мл	Тыльная поверхность кистей рук	1,5 мл

<b>Техники:</b> Микропапульная, папульная, линейная, канюльная	<b>Длительность контурирования папул:</b> до 3 суток
---	---

## КЛИНИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ



После интрадермального введения препарата наблюдается интенсивное увлажнение и повышение гидрорезерва кожи, реструктуризация дермы, повышение защитных свойств кожи. В результате курсового использования происходит уплотнение кожного лоскута, устранение морщин и уменьшение глубины складок, повышение тургора кожи и создание лифтинг-эффекта.



# REPART® 6 DELICATE

Биоревитализант  
для деликатных зон

## ФОРМА ВЫПУСКА:
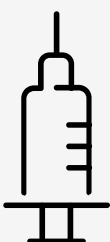
<b>1,5 мл</b> шприцы (стекло)		<b>5 мл</b> флаконы (стекло)	
-------------------------------------	--	------------------------------------	---

**REPART® 6 DELICATE** — обеспечивает достижение быстрого эффекта биоревитализации и способствует профилактике возрастных изменений. Происходит это за счет регулирования функции фибробластов, которые синтезируют межклеточное вещество дермы (гликозаминогликаны, коллаген и эластин). Препарат особенно эффективен для работы с деликатными зонами – кожей периорбитальной области, губ, шеи и декольте.

## ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА

Благодаря своей высокой текучести препарат максимально быстро распределяется в дерме и оказывает немедленные эффекты. ГК быстро включается в процессы метаболизма, что приводит к моментальному увлажнению и мягкому стимулированию клеток. Последние начинают быстрее делиться, одновременно улучшается синтез гликозаминогликанов, коллагена и эластина.

## ОСОБЕННОСТЬ ПРЕПАРАТА

Низкоконцентрированный биоревитализант. Невысокая концентрация ГК позволяет добиться качественного ухода за кожей, в особенности в деликатных областях, таких как шея, декольте, периорбитальная область и губы. Обеспечивает быстрый освежающий и увлажняющий эффект.

## РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Благодаря идеальным физико-химическим свойствам продукта папулы контурируются менее 12 часов.



## ПОКАЗАНИЯ:

- Биоревитализация деликатных зон – кожи губ, периорбитальной области, шеи и декольте
- Тусклый и усталый вид (обеспечивает быстрый освежающий эффект и сияние кожи)
- Комплексная терапия акне
- Нормализация себопродукции
- Сухость кожи любой этиологии
- Профилактика и терапия фотостарения
- Профилактика и терапия хроностарения
- Ревитализация кожи тыльной поверхности кистей рук и кожи тела
- Коррекция стрий
- Темные круги вокруг глаз
- Необходимость дополнительного увлажнения губ
- Подготовка и реабилитация пациентов до и после периода длительной инсоляции
- Подготовка и реабилитация пациентов до и после агрессивных процедур: срединные и глубокие химические пилинги, лазерная шлифовка, пластические операции
- Повышение результативности нитевого лифтинга и других косметологических процедур (методов)

Препарат рекомендован для биоревитализации пациентов, склонных к отекам, а также для пациентов с деформационным и отеочно-деформационным морфотипом в возрасте 25-35 лет.


## СОСТАВ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Натрия гиалуронат	<b>1,2 МДа</b>	pH =	<b>7,1 (+/- 0,1)</b>
Концентрация ГК	<b>18 мг/мл (1,8%)</b>		

## РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС:

Рекомендованный курс:	<b>4-6 процедур с интервалом 7-14 дней</b>
Поддерживающие процедуры:	<b>1 раз в 1,5-2 месяца</b>

Рекомендуется для включения в состав любых процедур биоревитализации в качестве препарата для деликатных зон.

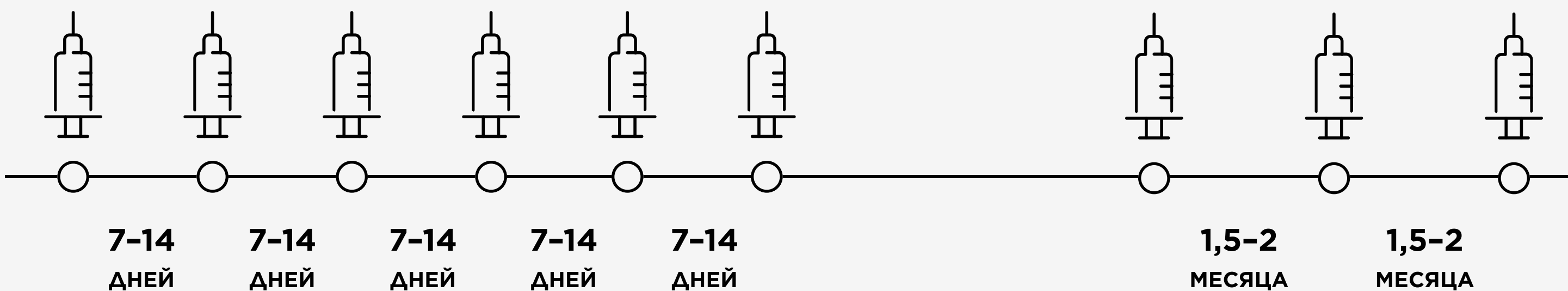

## РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ОБЪЕМ НА ПРОЦЕДУРУ:

Лицо	<b>1,5-2 мл</b>	Декольте	<b>1,5 мл</b>
Шея	<b>1,0-1,5 мл</b>	Периорбитальная область	<b>0,5-0,8 мл</b>

<b>Техники:</b> Папульная, микропапульная, фракционная	<b>Длительность контурирования папул:</b> не более 12 часов
---	--

## КЛИНИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

После введения препарата кожа приобретает свежий вид и сияние, улучшается цвет, происходит быстрое и интенсивное увлажнение, выравнивание микрорельефа, разглаживание мелких морщин и повышение защитных свойств дермы.

# REPART<sup>®</sup> 7 ULTIMATE

Биоревитализант с повышенной влагоемкостью, скинбустер-префиллер

## ФОРМА ВЫПУСКА:



**REPART<sup>®</sup> 7 ULTIMATE** — гель-имплантат с усиленной формулой для достижения эффекта пролонгированной биоревитализации. Добавление маннитола способствует повышению влагоемких свойств препарата, длительному нахождению и действию ГК в тканях, обеспечивает антиоксидантное действие. Такое сочетание активных ингредиентов переводит этот биоревитализант в класс скинбустеров, молекулы которого находятся длительное время в средних слоях дермы, обеспечивая пролонгированное действие.

## ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА

Концентрация гиалуроновой кислоты подобрана наилучшим образом для достижения клинического эффекта биоревитализации у пациентов с выраженной сухостью и признаками дерматоатрофии.

## ОСОБЕННОСТЬ ПРЕПАРАТА

Присутствие в составе маннитола способствует медленной биоферментации гиалуроновой кислоты и постепенной и длительной стимуляции фибробластов. В результате компоненты межклеточного вещества дермы вырабатываются на стабильно высоком уровне. Маннитол ускоряет удаление избыточной жидкости из межклеточного пространства в сосудистое русло у пациентов с отеками.

## СВОЙСТВА:

- Способствует повышению влагоемких свойств препарата
- Пролонгированное нахождение и действие ГК в тканях обеспечивает ревитализирующее (длительное увлажняющее) и антиоксидантное действие
- У пациентов с отеками повышает перфузию избыточной жидкости из межклеточного пространства в сосудистое русло

## ПОКАЗАНИЯ:

- Гравитационные изменения
- Комплексная терапия постакне
- Сухость кожи любой этиологии
- Профилактика и терапия фотостарения
- Профилактика и терапия хроностарения
- Получение эффекта длительного увлажнения кожи
- Склонность к отекам (препарат не вызывает и не провоцирует отечность на фоне введения ВМ ГК)
- Необходимость улучшить цвет лица и устранить усталый вид
- Ревитализация кожи тыльной поверхности кистей рук и кожи тела
- Коррекция стрий
- Деформационный, мелкоморщинистый и усталый морфотип лица в возрасте 35 лет и старше
- Выраженные признаки дерматоатрофии: глубокие морщины и складки, сниженный тургор, непроходящая сухость
- Подготовка и реабилитация пациентов до и после агрессивных процедур: срединные и глубокие химические пилинги, лазерная шлифовка, пластические операции
- Повышение результативности нитевого лифтинга и других косметологических процедур (методов)
- Сниженный антиоксидантный потенциал кожи, длительное воздействие на дерму свободных радикалов и негативных факторов внешней среды

## СОСТАВ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Натрия гиалуронат	<b>1,2 МДа</b>	Маннитол	<b>0,9%</b>
Концентрация ГК	<b>13,5 мг/мл (1,35%)</b>	pH =	<b>7,1 (+/- 0,1)</b>

## РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС:

Рекомендованный курс:	<b>3-4 процедуры с интервалом 2-3 недели</b>
Поддерживающие процедуры:	<b>1 раз в 2-3 месяца</b>



## РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ОБЪЕМ НА ПРОЦЕДУРУ:

Лицо	<b>1,5-2,0 мл</b>	Декольте	<b>1,0 мл</b>
Шея	<b>1,0 мл</b>	Тыльная поверхность кистей рук	<b>1,0 мл</b>

<b>Техники:</b> Микропапульная, папульная, линейная, канюльная	<b>Длительность контурирования папул:</b> 1 сутки
---	--

## КЛИНИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

Интенсивное и длительное увлажнение кожи, реструктуризация дермы, уплотнение и сокращение кожного лоскута, лифтинг-эффект, улучшение микрорельефа и цвета кожи, разглаживание мелких, средне-глубоких морщин и складок.

# REPART® PG

## Скинбустер-префиллер

### ФОРМА ВЫПУСКА:



**REPART® PG** — является уникальным препаратом, не имеющим аналогов на российском рынке. Префиллер-скинбустер на основе гиалуроновой кислоты, дополненный безопасным стабилизатором полиэтиленгликолем.

### ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА

Полиэтиленгликоль в составе препарата относится к безопасным комплексообразователям, используемым в медицине и фармацевтике. Сочетание гиалуроновой кислоты и полиэтиленгликоля превращает продукт в комбинированный гидрогель, резистентный к действию ферментов и обладающий пролонгированным биологическим действием.

### ОСОБЕННОСТЬ ПРЕПАРАТА

Уникальные свойства препарата позволяют выполнять процедуру в ином качестве. Основные преимущества инъекций REPART® PG:

- Не требует анестезии
- Процедура обеденного перерыва: занимает не более 10 минут
- Не имеет реабилитационных последствий
- Короткий курс – всего 1-2 сеанса с интервалом 30 дней
- Длительный результат, который сохраняется до 9 месяцев

Комфортен для пациента, т.к. процедура связана с низким уровнем травматичности и болевых ощущений. Препарат может вводиться по биоэстетическим точкам.



### СВОЙСТВА

Оказывает выраженные эффекты, сохраняющиеся в течение 4-9 месяцев:

- Лифтинг
- Сияние кожи
- Устранение усталого вида
- Значительное улучшение цвета лица
- Повышение тургора и эластичности кожи
- Разглаживание средних, глубоких морщин и складок

### ПОКАЗАНИЯ

Введение REPART® PG рекомендовано в качестве комфортной процедуры обеденного перерыва с коротким курсом процедур в следующих случаях:

- Возраст 30 лет и старше
- Атрофические рубцы
- Реструктуризация дермы
- Армирование мягких тканей
- Работа по телу: стрии, дряблость кожи
- Неравномерный тон и текстура кожи
- Постэруптивные состояния кожи лица
- Выраженные признаки дерматоатрофии
- Профилактика и терапия фотоповреждений кожи
- Гравитационные изменения овала лица и необходимость лифтинга кожи
- Профилактика и терапия возрастных хронологических изменений
- Заполнение поверхностных морщин, заломов и неглубоких складок
- Как комфортная процедура обеденного перерыва с коротким курсом процедур
- Комплексная антивозрастная терапия: сочетание с другими методами косметологии, в т.ч. лазерными технологиями, химическими пилингами и др.

## СОСТАВ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Натрия гиалуронат	<b>3,0 МДа</b>	Полиэтиленгликоль	<b>0,65%</b>
Концентрация ГК	<b>22 мг/мл (2,2 %)</b>	pH =	<b>7,1 (+/- 0,1)</b>

## РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС:

Рекомендованный курс:	<b>1-2 процедуры с интервалом 3-4 недели</b>
Поддерживающие процедуры:	<b>1 раз в 3 месяца</b>

## РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ОБЪЕМ НА ПРОЦЕДУРУ:

Лицо	<b>2,0 мл</b>	Декольте	<b>1,0 мл</b>
Шея	<b>1,0 мл</b>	Тыльная поверхность кистей рук	<b>2,0 мл*</b>

\*по 1 мл на каждую кисть

<b>Техники:</b> Бугорковая, БЭТ, канюльная, микропапульная, линейная	<b>Длительность контурирования бугорков: 2-3 суток</b>
---	--

## КЛИНИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

После введения препарата происходит реструктуризация дермы, разглаживание мелких, средних, глубоких морщин и складок; лифтинг кожи, коррекция овала лица при гравитационных изменениях, заполнение деформаций (носогубные складки, линии «марионеток», «кольца Венеры»), устранение атрофических и постакневых рубцов.